

Oxivir Plus Spray

Sredstvo za dezinfekcijo z razpršilko

Opis

Oxivir Plus Spray je čistilno razkužilo, pripravljeno za uporabo, primerno za neporozne trde površine in neinvazivne medicinske pripomočke.

Ključne lastnosti

- Baktericidno, virucidno, deluje tudi na kvasovke.
- Patentirana kislinska formulacija na osnovi vodikovega peroksida.
- Kratki kontaktni časi.
- Učinkovito čistilo.
- Brez dišav.

Prednosti

- Obširno testirano v skladu z evropskimi normami; učinkovito na širok spekter patogenov vključno s HIV, HCB, HCV, Koronavirus, virus ptičje gripe, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE in Norovirus.
- Čisti in dezinficira v enem koraku, kar skrajša čas dela.
- Odlični rezultati čiščenja; učinkovito odstranjevanje in preprečevanje nalaganja vodnega kamna zmanjšuje potrebo po predhodnem čiščenju.
- Varen za uporabo; brez opozoril o nevarnosti, ne vsebuje dražilnih snovi za dihala.
- Formulacija je nežna do površin in podaljšuje življenjsko dobo opreme.
- Varen za okolje; aktivna komponenta razpade v vodo in kisik.
- Primerno za uporabo na območjih z visokim tveganjem v zdravstvu, vključno z OR, ICU, NICU in sobe za bolnike.


Navodila za uporabo

Čiščenje in dezinfekcija s platenko z razpršilko:

1. Odstranite večje delce umazanije.
2. Sredstvo razpršite direktno na površino ali na krpo, s katero obrišete površino.
3. Po kontaktnem času obrišite do suhega ali pustite, da se posuši na zraku.

Doziranje

Prilavljeno za uporabo, redčenje ni potrebno.

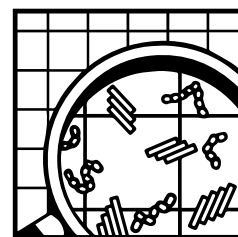

Oxivir Plus Spray

Tehnični podatki

Izgled: Bistra rumena tekočina

pH vrednost (delovna raztopina): 1,8

Relativna gostota (20°C): 1,000

Zgornji podatki so značilni za normalno proizvodnjo in jih ne smemo jemati kot specifikacijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Samo za profesionalne uporabnike. Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Reagira z oksidirajočimi snovmi.

Kompatibilnost izdelka

Pomembno: Ne mešajte z drugimi izdelki. Ne uporabljajte tople vode. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na vodo in kislino.

Pod priporočenimi pogoji uporabe, je Oxivir Plus primeren za uporabo na večini materialov.

Mikrobiološki podatki

Glej tabelo EN na zadnji strani.

Okoljske informacije

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v tem izdelku, so biološko razgradljive v skladu z zahtevami EU Uredbe o detergentih EC 648/2004.

Razpoložljivo pakiranje

Oxivir Plus Spray je na voljo v 6x0,75 L.

AHP® in Design ter Oxivir® so blagovne znamke družbe Diversey, Inc.

Oxivir Plus Spray

		Umazani pogoji
	EN test	Kontaktni čas
Baktericidno	EN 1276*	30 sekund
	EN 13727	5 minut
	EN 13697*	5 minut
	EN 16615	5 minut
Sporocidno	EN 1650*	15 minut
	EN 13624	15 minut
	EN 13697*	5 minut
	EN 16615	15 minut
Virucidno	EN 14476 Adenovirus	5 minut
	EN 14476 Poliovirus	5 minut
	EN 14476 Murine Norovirus	30 minut
	EN 14476 Vaccinia virus	10 minut
	EN 16777 Vaccinia virus	5 minut
Fungicidno	EN1650*	15 minut
	EN13624	15 minut
	EN 13697*	15 minut
* Testi, opravljeni v umazanih pogojih za nezdravstvena območja.		
** V čistih pogojih je polno virucidno delovanje doseženo v 5 minutah.		